

XXL

21

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ГЛАЗНОЙ МИКРОХИРУРГИИ
Н-156**

Набор предназначен для поставки в районы с умеренным, холодным и общим климатом.
Исполнение О 4.2 по ГОСТ 15150-69

Набор предназначен для оказания квалифицированной хирургической помощи.

1. Технические данные

- Габаритные размеры набора в упаковке: _____
- Масса набора не более 2 кг.

2. Комплект поставки

В каждый комплект поставки набора входят изделия, указанные в таблице.

№		Наименование	Кол-во шт
1	6/25	Ложка глазная острая большая жесткая	1
2	М-11	Молоток хирургический металлический с накладкой малый	1
3	ИНС-1	Инструменты Шоттера для инородных тел из роговицы	1
4	И-69	Игла (нож) дисцизионная НК125х2	1
5	ИГ-15	Игла (нож) для удаления инородных тел из роговицы НК120х3,5	3
6	Н-9	Нож копьевидный слабоизогнутый малый НК137х13	2
7	6/24	Ложка глазная острая малая	1
8	6/55	Шпатель глазной желобовидный изогнутый немагнитный	2
9	6/23	Ложка для хрусталиковой массы	1
10	Н-6	Нож катарактальный большой НЛ135х35	1
11	Н-5	Нож катарактальный малый НЛ125х25	1
12	С-11	Скальпель глазной брюшистый малый	2
13	С-12	Скальпель глазной брюшистый средний Сб140х30	2
14	С-10	Скальпель глазной остроконечный средний Со130х20	3
15	ДМ-5	Долото с рифленой ручкой плоское, 4мм	1
16	ДМ-6	Долото с рифленой ручкой плоское, 6мм	1
17	6/19	Крючок глазной Крюкова	2
18	К-12	Крючок глазной четырехзубый острый	2
19	6/15	Крючок для оттягивания глазных мышц	1
20	6/16	Крючок глазной для радужной оболочки острый	1
21	6/17	Крючок глазной для радужной оболочки тупой	1
22	Н-41	Ножницы глазные вертикально-изогнутые остроконечные 113мм	4
23	Н-42	Ножницы глазные вертикально-изогнутые тупоконечные 113мм	3
24	Н-3	Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 140мм	1
25	Р-46	Распатор Андогского	1
26	6/4	Иглодержатель глазной микрохирургический	1
27	Зн-42, зн-43	Зонд двухсторонний цилиндрический для слезного канала №5,6	1
28	П-76	Петли хрусталиковые по Веберу	1
29	6/33	Ножницы-пинцет для радужной оболочки микрохирургические	1
30	З-8	Зажим кровоостанавливающий глазной типа Москит прямой	2
31	6/2	Векоподъемник 14х13мм	1

32	3-92	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1	2
33	3-5	Зажим кровоостанавливающий 1x2 зубый зубчатый прямой №2	2
34	И-126	Иглодержатель глазной с фиксатором для пальца	1
35	ПМ-36	Пинцет анатомический глазной прямой ПА100x0.6	3

Сведения о приемке

3.1 Набор инструментов для глазной микрохирургии соответствует ТУ 9437-297-07610776-2011 и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК

Дата изготовления

4. Сведения о консервации

Условия хранения «С» для О4.2.
Предельный срок защиты без переконсервации – 5 лет.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок хранения набора – 5 лет
Гарантийный срок эксплуатации набора – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

6. Сведения о рекламациях

6.1 Рекламации, в установленном порядке, вместе с паспортом предъявляются по адресу:
606131, п.Тумботино, Нижегородской области, Павловского района, ул. Пушкина, д.1
ОАО «Медико-инструментальный завод им. М. Горького»

7. Хранение

Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре от -50° до +40° С.

8. Подготовка к работе

8.1 Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации согласно МУ 287-113.

Дезинфекцию проводят сухим горячим воздухом при температуре (120±3)°, время выдержки- (45+5)мин., или кипячением в дистиллированной воде с натрием двууглекислым 2% (пищевая сода) при температуре (99±1)°, время выдержки 15+5 мин.

Предстерилизационную очистку проводят следующим образом: изделия предварительно ополаскивают в проточной воде и погружают на 15 мин. в раствор моющего препарата «Биолот», концентрация раствора 0,5%, t-40° или в раствор перекиси водорода с моющим препаратом «Лотос» концентрация 0,5%, t-50° и время 15 мин. Повторно ополаскивают сначала в проточной воде, затем в дистиллированной. Перед стерилизацией изделия сушат горячим воздухом при t-85°±5° до полного исчезновения влаги.

Стерилизацию инструментов проводят в воздушном стерилизаторе сухим горячим воздухом с температурой 160°-180°.