

XX

18

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ  
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ НИС-"МТ"**

ПАСПОРТ

ПТО «Медтехника»  
Казань

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор инструментов хирургических стоматологический НИС-"МТ" (далее – набор) предназначен для оснащения стоматологических отделений клиник и больниц.

1.2. Набор предназначен для поставки в районы с умеренным и холодным климатом, исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Комплект поставки набора соответствует таблице.

Таблица

№	Наименование и количество изделий
1.	Долото с рифленой ручкой желобоватое изогнутое 4мм 1 шт
2.	Долото с рифленой ручкой желобоватое 6мм 1 шт
3.	Долото с рифленой ручкой плоское 4мм 1 шт
4.	Долото с рифленой ручкой плоское 6мм 1 шт
5.	Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 8 шт
6.	Зажим с кремальерой для операционного белья 8 шт
7.	Зеркало стоматологическое диаметром 22мм ЗБ-1 3 шт
8.	Зеркало носовое с длиной губок 40мм 1 шт
9.	Зонд зубной изогнутый 1 шт
10.	Зонд хирургический желобоватый длиной 170мм 1 шт
11.	Зонд цилиндрический двухсторонний для слезного канала №1 №2 1шт
12.	Игла хирургическая ЗВ1-1,1х50 10шт
13.	Игла хирургическая ЗВ1-0,7х28 10шт
14.	Игла хирургическая 4 А1-0,6х36 10шт
15.	Иглодержатель общехирургический легированный 200мм 1шт
16.	Иглодержатель общехирургический легированный 160мм 1шт
17.	Игольник металлический 1шт
18.	Кипятильник дезинфекционный П-40-1 1 шт
19.	Корнцанг изогнутый 1шт
20.	Крючки пластинчатые парные по Фарабефу 1 шт
21.	Крючок хирургический острый трехзубый №2 2 шт
22.	Ложка медицинская костная острая малая жесткая 1 шт
23.	Ложка медицинская костная двухсторонняя острая жесткая 1 шт
24.	Ложка медицинская ушная острая большая жесткая 1 шт
25.	Ложка медицинская ушная острая малая жесткая 1 шт
26.	Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей 2 шт
27.	Молоток стоматологический металлический с накладкой 27х40,5 1 шт
28.	Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 140мм 2 шт
29.	Ножницы с одним острым кондом 140 мм 1 шт
30.	Ножницы для коронок вертикально-изогнутые 1 шт
31.	Ножницы для металла 200 мм 1 шт.
32.	Ножницы для ногтей прямые 100 мм. 1 шт.
33.	Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5 6 шт
34.	Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5 8 шт
35.	Пинцет зубной изогнутый Пси 150х0,8 2шт
36.	Пинцет хирургический глазной прямой большой ПХ100х0,6 1 шт
37.	Проволока АПТ-2(длиной 5м) 13уп.
38.	Проволока лигатурная 0,35-0,45мм длиной 36м 4 шт
39.	Распатор изогнутый для отслойки кожи лица 1 шт
40.	Распатор прямой для отслойки кожи лица 1 шт



41.	Распатор Андогского офтальмологический 1 шт
42.	42.Рефлектор лобный с мягким оголовьем РМО2 1 шт
43.	Роторасширитель с кремальерой длиной 190 мм 1 шт
44.	Роторасширитель винтовой 1 шт
45.	Ручка для стоматологического зеркала 1 шт
46.	Скальпель брюшистый средний Сб150х40 4 шт
47.	Скальпель глазной брюшистый средний Сб140х30 2 шт
48.	Скальпель глазной остроконечный средний Со130х20 2шт
49.	Скальпель остроконечный средний Со150х40 2 шт
50.	Укладка матерчатая унифицированная №1 2 шт
51.	Укладка матерчатая шторная 1 шт
52.	Чехол для кипятильника П-40-1 1 шт
53.	Чехол для укладок. 1шт
54.	Шина назубная ленточная Ввсильева 20 шт
55.	Шпатель для языка двухсторонний с круглыми отверстиями 1 шт
56.	Щипцы штыковидные с узкими овальными губками 1 шт
57.	Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей с узкими овальными губками, изогнутые по плоскости 1 шт
58.	Щипцы крапонные №1 1шт
59.	Щипцы крапонные №2 1 шт
60.	Щипцы для удаления моляров нижней челюсти №22 1шт
61.	Щипцы с широкими губками для удаления корней зубов нижней челюсти №33 1 шт
62.	Экскаватор№3 1 шт
63.	Экскаватор№4 1шт
64.	Элеватор зубной прямой №3 1шт
65.	Языкодержатель для взрослых 1 шт
	Паспорт 1 шт

### 3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Гарантийный срок эксплуатации набора при условии соблюдения потребителем требований по эксплуатации, техническому обслуживанию и хранению – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

3.2. Гарантийный срок хранения в предписанных в п.4.1 условиях – 5 лет.

### 4. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИИ

4.1. Набор законсервирован в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для категории условий хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69.

4.2. Предельный срок защиты без переконсервации – 5 лет.

4.3. Набор в упакованном виде должен храниться в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

### 5. РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Рекламации в установленном порядке предъявляются предприятию-изготовителю с приложением настоящего паспорта по адресу:

420095, г.Казань, ул.Восстания, 100, ПТО «Медтехника»

Факс: (843) 564-82-45

### 6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. После вскрытия упаковки и после каждого использования инструменты должны быть промыты, высушены и подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.



6.2. Дезинфекция инструментов проводится одним из следующих способов:

- физическим, состоящим из:

1) предварительного промывания под проточной водой в течение  $(0,5 \pm 0,1)$  мин. с применением мягкой щетки или марлевого тампона;

2) дезинфекции сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре  $(120 \pm 4)^\circ\text{C}$  в течение  $(45 \pm 5)$  мин.;

- химическим, состоящим из:

1) погружения в раствор в специальных емкостях из стекла, пластмассы или покрытых эмалью без повреждений. Концентрация растворов в процентах и время выдержки в минутах определяются согласно Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке стерилизации изделий медицинского назначения МУ-287-113 (далее – МУ-287-113), утвержденных Госсанэпиднадзором МЗ РФ 30 декабря 1998 г., или инструкциям по применению соответствующих дезинфицирующих средств. Разъемные изделия дезинфицируют в разобранном виде. Каналы и полости изделий заполняют дезинфицирующим раствором без воздушных пробок;

2) промывания в проточной питьевой воде в течение  $(3 \pm 1)$  мин.;

3) промывания в дистиллированной воде в течение  $(0,5 \pm 0,1)$  мин.

4) просушивания горячим воздухом при температуре  $(85 \pm 2, 85-10)^\circ\text{C}$  до полного исчезновения влаги.

6.3. Предстерилизационная очистка производится в моющем растворе в следующей последовательности:

1) предварительное промывание в проточной питьевой воде в течение  $(0,5 \pm 0,1)$  мин.;

2) замачивание в моющем растворе при температуре  $(40 \pm 5)^\circ\text{C}$  в течение 15 мин. при полном погружении;

3) промывание в моющем растворе мягкой щеткой или марлевым тампоном;

4) промывание в проточной питьевой воде в течение  $(3 \pm 1)$  мин.;

5) промывание дистиллированной водой в течение  $(0,5 \pm 0,1)$  мин.;

6) просушивание горячим воздухом при температуре  $(85 \pm 2, 85-10)^\circ\text{C}$  до полного исчезновения влаги.

Выбор раствора для предстерилизационной очистки рекомендуется производить согласно МУ-287-113.

6.4. Растворы для дезинфекции и предстерилизационной очистки необходимо разводить исключительно в дистиллированной или деминерализованной воде. Использование воды из водопроводной сети недопустимо.

6.5. Допускается дезинфекция инструментов, совмещенная с предстерилизационной очисткой, средствами, предназначенными для дезинфекции инструментов, зарегистрированными в РФ и разрешенными к применению в лечебно-профилактических учреждениях.

6.6. Допускается мойка инструментов в ультразвуковой моющей машине в соответствии с инструкцией по эксплуатации моечной машины. Инструменты в корзину следует загружать с осторожностью.

6.7. Стерилизацию инструментов проводят одним из следующих способов:

- газовым в этилен-оксиде в соответствии с МУ-287-113;

- химическим в растворе формальдегида в этиловом спирте в соответствии с МУ-287-113;

- в паровом стерилизаторе при температуре  $(132 \pm 2)^\circ\text{C}$  и давлении 0,2 МПа в течение  $(20 \pm 2)$  мин.

## 7. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

7.1. Набор инструментов хирургических стоматологических НИС-"МТ" соответствует ТУ 9437-031-40686779-2008 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска - 6 ОКТ 2016 Штамп ОТК

