

XVI

Открытое Акционерное Общество
«Медикоинструментальный завод им. В.И. Ленина»

**НАБОР
ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ АКУШЕРСКО-
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ**

ПАСПОРТ

Н 226 00 00 ПС

1

1. Назначение

1.1 Набор для экстренной акушерско-гинекологической помощи предназначен для оказания экстренной акушерско-гинекологической помощи при выездах.

1.2 Набор предназначен для поставки в районы с умеренным холодным климатом, климатическое исполнение набора-УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

2. Технические данные

2.1 Габаритные размеры набора в упаковке 250x500x600 мм,

2.2 Масса набора: 19 кг

3. Комплект поставки

3.1 Комплект поставки набора соответствует таблице.

		Таблица
	Наименование	Кол-во,
УПАКОВОЧНОЕ МЕСТО №1		
Укладка №1		
1	Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №2	10 ✓
2	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1	12 ✓
3	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №2	10 ✓
4	Зажим с кремальерой для операционного белья	4 ✓
5	Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине	10 ✓
Укладка №2		
1	Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый 235 мм	2 ✓
2	Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой 240 мм	2 ✓
3	Катетер уретральный металлический изогнутый женский №14	1 ✓
4	Катетер уретральный металлический изогнутый женский №17	1 ✓
5	Корнцанг прямой	4 ✓
6	Корнцанг изогнутый	5 ✓
7	Ножницы для рассечения пуповины горизонтально-изогнутые 150 мм	1 ✓

8	Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких плоскостях вертикально-изогнутые 230 мм	1 ✓
9	Ножницы для рассечения плода вертикально-изогнутые 240 мм	1 ✓
10	Ножницы с узкими закругленными лезвиями вертикально-изогнутые 175 мм	2 ✓
11	Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые 170 мм	1 ✓
12	Ножницы тупоконечные прямые 170 мм	1 ✓
13	Штопор для захватывания фибромиом	1 ✓
14	Щипцы маточные двухзубые прямые №1	1 ✓
15	Щипцы маточные двухзубые прямые №2	1 ✓
16	Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые)	2 ✓
17	Щипцы двухзубые острые	2 ✓
18	Щипцы для удаления плодного яйца прямые с шириной губок 14 мм	1 ✓
	Упаковочное место №2	
	Укладка №3	
1	Зонд хирургический желобоватый длиной 170 мм	1 ✓
2	Зонд хирургический пуговчатый с ушком	1 ✓
3	Игла инъекционная многократного применения 0,6х30	1 ✓
4	Игла инъекционная многократного применения 0,8х40	2 ✓
5	Игла инъекционная многократного применения 1,0х60	1 ✓
6	Игла лигатурная тупая левая №3	1 ✓
7	Игла лигатурная тупая правая №3	1 ✓
8	Игла хирургическая 4В1-0,6х20	10 ✓
9	Игла хирургическая 4В1-1,0х45	10 ✓
10	Игла хирургическая 4В1-1,2х55	10 ✓
11	Иглодержатель сосудистый 160 мм	2 ✓
12	Иглодержатель сосудистый 200 мм	4 ✓
13	Игольник	1 ✓
14	Крючок хирургический 4-х зубый острый №2	2 ✓
15	Крючок хирургический 4-х зубый тупой №4	2 ✓
16	Перфоратор копьеобразный	1 ✓
17	Пинцет анатомический общего назначения ПА 250х2,5	4 ✓

18	Пинцет для наложения и снятия металлических скобок	1 ✓
19	Пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2,5	4 ✓
20	Пинцет хирургический общего назначения ПХ 200х2,5	2 ✓
21	Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250х2,5	4 ✓
22	Пластина для оттеснения внутренностей	1 ✓
23	Шпатель для языка	1 ✓
	Укладка №4	
1	Кюретка гинекологическая острая	1 ✓
2	Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №2	1 ✓
3	Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки острая №6	1 ✓
4	Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани №2	1 ✓
5	Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани №4	1 ✓
6	Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани №6	1 ✓
7	Зеркала влагалищные по Симсу (комплект)	1 ✓
	УПАКОВОЧНОЕ МЕСТО №3	
	УКЛАДКА №5	
1	Зеркало-подъемник влагалищное желобоватое №1	1 ✓
2	Зеркало-подъемник влагалищное желобоватое №3	1 ✓
3	Зеркало-подъемник влагалищное по ОТТО №2	1 ✓
4	Рефлектор лобный	1 ✓
5	Скальпель брюшистый средний Сб 150х40	2 ✓
6	Скальпель остроконечный средний Со 150х40	1 ✓
7	Шприц А-10	1 ✓
8	Шприц А-2	1 ✓
9	Щетка гигиеническая	1 ✓
	ВЛОЖЕНО В КОРОБКУ	

1	Зеркало: влагалищное по Дуайэну (комплект)	1
2	Зеркало для брюшной стенки 60 мм	1 ✓
3	Зеркало для брюшной стенки 100 мм	1 ✓
4	Крониокласт	1 ✓
5	Крючок декопитационный	2 ✓
6	Тазик почкообразный	1 ✓
7	Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый	1 ✓
8	Щипцы акушерские изогнутые (по Симсу-Брауну)	1 ✓
	Паспорт	1

4. Сведения о консервации

4.1 Набор законсервирован в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для категории условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

5. Сведения о хранении

5.1 Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от $+40^{\circ}\text{C}$ до -50°C и относительной влажности воздуха 80% при температуре $+25^{\circ}\text{C}$. Воздух не должен содержать примесей вызывающих коррозию.

5.2 Срок хранения без переконсервации – 5 лет

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации набора при условии соблюдения потребителем требований по эксплуатации, техническому обслуживанию и хранению - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

7. Подготовка к работе

Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации. Дезинфекцию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре $(120 \pm 4)^{\circ}\text{C}$ в течение (45 ± 5) мин.

Изделия, входящие в набор, подвергаются предстерилизационной очистке моющим раствором «Биолот» в следующей последовательности:

1. предварительное ополаскивание под проточной водой в течение $(0,5 \pm 0,1)$ мин.

2. замачивания в моющем растворе при температуре $(40 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ в течение (15 ± 1) мин.

3. мойка в течение (0,5+0,1) мин.

4. ополаскивание под проточной водой в течение (3+1) мин.

5. ополаскивание дистиллированной водой в течение (0,5+0,1) мин.

6. просушивание горячим воздухом при температуре (85+2-10) °С до полного исчезновения влаги.

Стерилизацию изделий проводит сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре (180+2-10)°С в течение (60+5) мин.

8. Утилизация.

Инструменты набора нетоксичны, апиrogenны, могут быть подвергнуты переработке. Относятся к отходам класса Б.

Утилизируются после обязательной дезинфекции вместе с отходами класса А в соответствии с правилами СанПин 2.1.7.2790-10.

9. Сведения о рекламациях

Рекламации в установленном порядке вместе с паспортом предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 606120 г. Ворсма, Нижегородская обл., ул. Ленина, 86 ОАО «МИЗ-Ворсма».

10. Сведения о приемке

Набор соответствует

ТУ 9437-297-07610776-2011 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Штамп ОТК

11. 2018



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

КРУГЛОВ Л. Г.



24

**Расшифровка комплектов, входящих
в Набор для экстренной акушерско-гинекологической помощи
(Н – 226)**

Акт приема № 30/9 от 11 декабря 2018 года.

Упаковочное место № 2

Укладка № 4

7. Зеркала влагалищные по Симсу (комплект) количество 1 шт.

- Зеркало влагалищное по Симсу № 1 (рабочая часть 21x85) - 1 шт.
- Зеркало влагалищное по Симсу № 2 (рабочая часть 24x90) - 1 шт.
- Зеркало влагалищное по Симсу № 3 (рабочая часть 28x95) - 1 шт.
- Зеркало влагалищное по Симсу № 4 (рабочая часть 32x105) - 1 шт.
- Зеркало влагалищное по Симсу № 5 (рабочая часть 36x110) - 1 шт.

Упаковочное место № 3

Вложено в коробку

1. Зеркало влагалищное по Дуайену (комплект) количество 1 шт.

- Зеркало влагалищное по Дуайену № 1 (рабочая часть 88x35) – 1 шт.
- Зеркало влагалищное по Дуайену № 2 (рабочая часть 88x45) – 1 шт.
- Зеркало влагалищное по Дуайену № 3 (рабочая часть 60x60) – 1 шт.
- Зеркало влагалищное по Дуайену № 4 (рабочая часть 118x45) – 1 шт.
- Зеркало влагалищное по Дуайену № 5 (рабочая часть 88x60) – 1 шт.

Председатель приемной комиссии:



Зав. складом А.В.Попов