

№ 12

101
411-2018

**НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ БОЛЬШОЙ НИПб-«МТ»**

ПАСПОРТ



ПТО «МЕДТЕХНИКА»
Казань
2018

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Набор инструментов хирургических перевязочный большой НИПб-«МТ» (далее - набор) предназначен для обработки ран в клинических и полевых условиях.

1.2. Набор предназначен для поставки во все макроклиматические районы на суше, кроме климатического района с антарктическим холодным климатом, исполнение и категория набора – О4.2 по ГОСТ 15150-69.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1. Комплект поставки набора соответствует таблице.

Таблица

№	Наименование изделия	Кол.
	Укладка №1	
1.	Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1	6 ✓
2.	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1	6 ✓
3.	Зажим кровоостанавливающий типа «Москит» прямой	6 ✓
4.	Зажим кровоостанавливающий типа «Москит», изогнутый по плоскости	6 ✓
5.	Зажим с кремальерой для операционного белья	4 ✓
6.	Иглодержатель общехирургический, 160 мм	2 ✓
	Укладка №2	
7.	Зонд хирургический желобчатый, 170 мм	6 ✓
8.	Зонд хирургический пуговчатый двухсторонний	6 ✓
9.	Игла хирургическая 3В1-0,7х28	30
10.	Игла хирургическая 3В1-1,1х50	30
11.	Игла хирургическая 3В1-1,3х70	30
12.	Игла хирургическая 4А1-0,6х30	30
13.	Игла хирургическая 4В1-0,6х20	30
14.	Игла хирургическая 4В1-1,0х45	30
15.	Игла хирургическая 4В1-1,2х35	30
16.	Крючок трахеотомический острый	2 ✓
17.	Лезвие съемное № 23	10 ✓ <i>90 VII-2022</i>
18.	Лезвие съемное № 24	10 ✓ <i>90 VII-2022</i>
19.	Ложка костная двухсторонняя острая	1 ✓
20.	Ложка костная острая большая жесткая	1 ✓
21.	Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм	6 ✓
22.	Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм	6 ✓
23.	Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм	1 ✓
24.	Пинцет анатомический общего назначения ПА 150х2,5	6 ✓
25.	Пинцет ушной горизонтально изогнутый ПАи 105х1,5	1 ✓
26.	Ручка скальпеля большая, 130 мм	2 ✓
27.	Скальпель брюшистый средний Сб 150х40	4 ✓
28.	Скальпель остроконечный средний Со 150х40	2 ✓
29.	Трубки трахеотомические (комплект из 6 шт.) <i>(27-26 1/2 5шт)</i>	1 ✓

№	Наименование изделия	Кол.
	Укладка №3	
30.	Иглодержатель соединительный, 200 мм	1 ✓
31.	Катетер уретральный металлический мужской изогнутый № 18	1 ✓
32.	Корнцанг изогнутый	2 ✓
33.	Крючок хирургический двузубый острый	2 ✓
34.	Крючок хирургический однозубый костный острый	2 ✓
35.	Крючок хирургический пластинчатый по Фарабефу 150 мм (парный)	3 ✓
36.	Пинцет анатомический общего назначения ПА 250х2,5	6 ✓
37.	Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250х2,5	6 ✓
38.	Роторасширитель с кремальерой большой, 190 мм	1 ✓
39.	Щипцы костные-кусачки шарнирные с двойной передачей с прямыми губками изогнутые по плоскости	1 ✓
40.	Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые	1 ✓
41.	Языкодержатель для взрослых	1 ✓
	Паспорт	

3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3.1. Гарантийный срок эксплуатации набора при условии соблюдения потребителем требований по эксплуатации, техническому обслуживанию и хранению – 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

3.2. Гарантийный срок хранения в предписанных в п.4.3 условиях – 5 лет с момента консервации.

4. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И ХРАНЕНИИ

4.1. Набор законсервирован в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для категории условий хранения «С» для О4.2 по ГОСТ 15150-69.

4.2. Предельный срок защиты без переконсервации – 5 лет.

4.3. Набор в упакованном виде должен храниться в закрытом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25°С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Рекламации в установленном порядке предъявляются изготовителю с приложением настоящего паспорта по адресу производства: 420095, г.Казань, ул.Восстания, д.100, ПГО «МЕДТЕХНИКА». Тел.: (843) 564-82-27, 560-57-24, 557-39-37.

6. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. После вскрытия упаковки и после каждого использования инструменты набора должны быть промыты, высушены и подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

6.2. Дезинфекция инструментов проводится одним из способов:

- химическим;

для инструментов из металлов, силиконовой резины:

1) погружение инструментов в раствор в специальных емкостях из стекла, пластмассы или покрытых эмалью без повреждений. Концентрация растворов (%) и время выдержки (мин.) выбираются согласно Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения МУ-287-113 (далее – МУ-287-113), утвержденным Госсанэпиднадзором МЗ РФ 30 декабря 1998 г., или согласно инструкциям по применению соответствующих дезинфекционных средств.

Разъемные инструменты дезинфицируют в разобранном виде. Каналы и полости инструментов заполняют дезинфицирующим раствором (без воздушных пробок);

2) промывание инструментов в проточной питьевой воде в течение (1-3) мин.;

3) промывание в дистиллированной воде в течение (0,5±0,1) мин.;

4) просушивание горячим воздухом при температуре (85±2, 85-10)°С до полного исчезновения влаги.

- физическим:

для инструментов из металлов, силиконовой резины:

1) предварительное промывание под проточной водой в течение (0,5±0,1) мин. с применением мягкой щетки или марлевого тампона;

2) дезинфекция сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре (120±4)°С в течение (45±5) мин.

для инструментов из металлов, термостойких полимерных материалов, резины, латекса, силиконовой резины:

1) кипячение в дистиллированной воде или с добавлением 2 % двууглекислого натрия при температуре (99±1)°С в течение (20 - 30) мин. при полном погружении инструментов в воду;

2) просушивание горячим воздухом при температуре (85±2, 85-10)°С до полного исчезновения влаги.

6.3. Предстерилизационная очистка производится в моющем растворе в следующей последовательности:

1) предварительное промывание под проточной водой в течении (0,5±0,1) мин.;

2) замачивание в моющем растворе при температуре (40±5)°С в течение 15 мин. при полном погружении;

3) промывание в моющем растворе мягкой щеткой или марлевым тампоном;

4) промывание под проточной водой в течении (3±1) мин.;

5) промывание дистиллированной водой в течении (0,5±0,1) мин.;

6) просушивание горячим воздухом при температуре (85±2, 85-10)°С до полного исчезновения влаги.

Выбор раствора для предстерилизационной очистки рекомендуется производить согласно МУ-287-113.

Растворы для дезинфекции и предстерилизационной очистки необходимо разводить исключительно в дистиллированной или деминерализованной воде. Использование воды из водопроводной сети недопустимо.

6.4. Допускается дезинфекция и предстерилизационная очистка инструментов, совмещенные в одном процессе, средствами, зарегистрированными в РФ и разрешенными к применению в лечебно-профилактических учреждениях.

6.5. Допускается мойка инструментов в моечно-дезинфицирующих или ультразвуковых моющих машинах в соответствии с инструкциями по эксплуатации этих машин. Инструменты в корзины следует загружать с осторожностью. Микроинструменты должны укладываться на мягкие подложки в специальные коробки (боксы).

6.6. Стерилизацию инструментов следует проводить согласно МУ 287-113 одним из следующих способов:

- газовым – в этиленоксиде;
- химическим – в растворе, разрешенном для применения в лечебно-профилактических учреждениях;
- воздушным – сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе (режим: 180°C – 60 мин., 160°C – 150 мин.)

- паровым – в гравитационном (режим: 132°C – 20 мин) или форвакуумном стерилизаторе (режим: 121°C – 15 мин, 126°C – 10 мин., 134°C – 3,5 мин.).

Не рекомендуется использовать стерилизацию воздействием низкотемпературной плазмы, поскольку воздействие данного вида стерилизации на отечественные материалы недостаточно изучено.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

7.1. Инструменты набора нетоксичны, апиrogenны, могут быть подвергнуты переработке. Относятся к отходам класса Б. Утилизируются после обязательной дезинфекции вместе с отходами класса А в соответствии с правилами СанПиН 2.1.7.2790-10.

8. СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

8.1. Набор соответствует требованиям ТУ 9437-031-40686779-2008 и отвечает условиям длительного хранения.

Дата выпуска ИЮЛЬ 2018

Штамп ОТК



Зум

