

Открытое Акционерное Общество
«Медикоинструментальный завод им. В.И. Ленина»

14

НАБОР
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ БОЛЬШОЙ

ПАСПОРТ

1. Назначение

Набор перевязочный большой предназначен для поставки в районы с умеренным и холодным климатом.

Исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Набор предназначен для обработки ран в клинических и полевых условиях.

2. Технические данные

Габаритные размеры набора в упаковке (510x220x110) мм.

Масса набора (6 = 0,5) кг

3. Комплект поставки

В комплект поставки набора входят изделия, указанные в таблице.

Таблица

	Наименование	Кол-во, шт.
	Упаковочное место №1	
	Кипятильник дезинфекционный П-40-1	1 ✓
	Чехол для кипятильника П-40-1	1 ✓
	Укладка матерчатая унифицированная №1	1
1	Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый № 1	6 ✓
2	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой № 1	4 ✓
3	Зажим с кремальерой для операционного белья	3 ✓
4	Иглодержатель общехирургический 160 мм	1 ✓
5	Крючки пластинчатые парные по Фарабефу (комплект из 2-х шт.)	1 ✓
6	Корнцанг изогнутый	1 ✓
7	Ножницы тупоконечные прямые, 170 мм	1 ✓
8	Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм	1 ✓
9	Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые, 140 мм	2 ✓
10	Пинцет анатомический общего назначения ПА 250x2,5	2 ✓
11	Пинцет хирургический общего назначения ПХ 250x2,5	1 ✓
12	Роторасширитель с кремальерой длиной 190мм	1 ✓
13	Языкодержатель для взрослых	1 ✓
14	Катетер уретральный металлический мужской	1 ✓
	Укладка матерчатая шторная	1
	Скальпель брюшистый средний СБ 150x40	3 ✓

	Наименование	Кол-во, шт.
	Скальпель остроконечный средний Со 150x40	2 ✓
	Троакары полостные (комплект)	1 ✓
	Укладка матерчатая унифицированная №2 ✓	1
1	Игольник металлический	1 ✓
2	Крючок трахеотомический острый	1 ✓
3	Пинцет анатомический общего назначения ПА 150x2,5	3 ✓
4	Пинцет зубчатопалчатый ПХи 150x5,5	1 ✓
5	Пинцет ушной штыковидный Паи 140x1,5	2 ✓
6	Зонд хирургический желобоватый 170 мм	1 ✓
7	Зонд хирургический пуговчатый 2-х сторонний	1 ✓
8	Игла хирургическая 3В1-0,7x28	10 ✓
9	Игла хирургическая 3В1-1,1x50	10 ✓
10	Трубка трахеотомическая пластмассовая №3	1 ✓
11	Трубка трахеотомическая пластмассовая №4	1 ✓

4. Сведения о приемке

Набор перевязочный большой соответствует ТУ 9437-297-07610776-2011 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

10.09.2014



Штамп ОТК

5. Сведения о консервации

Условия хранения 2 (С)

Срок защиты 5 лет при сроке транспортирования до 1 месяца.

Дата консервации

6. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации набора - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения набора - 5 лет.

7. Хранение

Набор в упаковке предприятия-изготовителя должен храниться в закрытом помещении при температуре воздуха от -40°C до -50°C и относительной влажности воздуха 60% при температуре +20°C.

Воздух не должен содержать примесей вызывающих коррозию.

8. Подготовка к работе

Изделия после расконсервации должны быть подвергнуты дезинфекции, предстерилизационной очистке, стерилизации. Дезинфекцию изделий проводить сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре $(120 \pm 4)^\circ\text{C}$ в течение $(45-5)$ мин.

Изделия, входящие в набор, подвергаются предстерилизационной очистке моющим раствором «Биолот» в следующей последовательности:

1. предварительное ополаскивание под проточной водой в течение $(0,5+0,1)$ мин.
2. замачивания в моющем растворе при температуре $(40-5)^\circ\text{C}$ в течение $(15+1)$ мин. при полном погружении.
3. мойка в течение $(0,5+0,1)$ мин.
4. ополаскивание под проточной водой в течение $(3-1)$ мин.
5. ополаскивание дистиллированной водой в течение $(0,5+0,1)$ мин.
6. просушивание горячим воздухом при температуре $(85+2-10)^\circ\text{C}$ до полного исчезновения влаги.

Стерилизацию изделий проводит сухим горячим воздухом в воздушном стерилизаторе при температуре $(180+2-10)^\circ\text{C}$ в течение $(60-5)$ мин.

9. Сведения о рекламациях

рекламации в установленном порядке вместе с паспортом предъявляются предприятию-изготовителю по адресу: 606120 г. Ворсма, Нижегородская обл., ул. Ленина, 86.