

Инструкция по применению Диспансерной системы «Изосепт»

Состав: нетканый материал спанлейс (вискоза, полиэфир (полиэстер)), плотность и размер уточняются у заказчика, с поперечной перфорацией по линии отрыва в индивидуальной герметичной полиэтиленовой упаковке.

Салфетки предназначены для уборки, экспресс дезинфекции небольших по площади поверхностей, а также обработку рук, также применение может быть абсолютно любой, начиная от собственного дома и заканчивая хирургическими блоками больниц. Рекомендуется использовать данные салфетки вместо ветоши или тряпок, которые являются рассадниками микробов.

Применение салфеток позволяет сократить время уборки и расход дезинфицирующего средства.

Салфетки не оставляют следов ворса на протираемых поверхностях, имеют однородную полимерную структуру, обеспечивающую высокую устойчивость материала к истиранию.

Назначение

Для очистки и дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных для обработки твердых непористых поверхностей в помещениях, различных предметов, в т.ч. загрязненных кровью;

- поверхностей жесткой мебели (подголовники, подлокотники кресел и др.);
- поверхностей медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии, стоматологические наконечники, зеркала, для очистки предметных стекол от иммерсионного масла);
- оптических приборов и оборудования, разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами;
- датчиков диагностического оборудования (УЗИ и т.п.);
- наконечников для клизм, термометров, фонендоскопов;
- осветительной аппаратуры, жалюзи и т.п.;
- предметов ухода за больными, игрушек из непористых, гладких материалов (пластик, стекло, металл и др.);
- наружных поверхностей шлангов гибких эндоскопов и колоноскопов (при условии, что не будет наблюдаться фиксация органических загрязнений);
- столов (в т.ч. операционных, манипуляционных, пеленальных, родильных), гинекологических и стоматологических кресел, кроватей, реанимационных матрасов и др. жесткой мебели;
- поверхностей кузезов (с последующим обязательным двукратным протираем поверхности кузеза стерильной салфеткой, смоченной в стерильной воде и вытиранием насухо стерильными салфетками после каждого протираем);

В лечебно-профилактических учреждениях любого профиля (в том числе стоматологических кабинетах, кабинетах диагностики, эндоскопических и колоноскопических отделениях, офтальмологических, приемных, операционных отделениях, отделениях реанимации, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного приема, детских стационарах, акушерских клиниках, включая отделения неонатологии), клинических, микробиологических и других лабораториях, в машинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на санитарном транспорте, на станциях переливания крови, в детских дошкольных и школьных учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, потребительских промышленных рынках, учреждениях социального обеспечения и населением в быту

Условия хранения: хранить в плотно закрытой упаковке производителя в крытых складских помещениях при температуре не выше плюс 35°C, в местах, недоступных детям, вдали от нагревательных приборов, открытого огня, прямых солнечных лучей.

Срок годности 2 года.

По истечению срока годности средство и упаковку утилизируют как бытовой отход.