

Справка по экспресс тестам на COVID 19 (AnyLab COVID-19 Ag Test Kit).

Описание:

Тест предназначен для качественного определения антигена SARS-CoV-2 образце мазка, полученного из носоглотки человека.

Процедура тестирования:

1. Сбор образцов

- 1) Пациенту необходимо очистить полость носа перед взятием мазка.
- 2) Поднимите голову пациента так, чтобы путь от ноздри к носоглотке был как можно более прямым.
- 3) Осторожно введите тампон в ноздрю до задней части носоглотки, затем несколько раз поверните тампон.
- 4) Выньте тампон из ноздри, затем вставьте его в пробирку с буферным раствором и покрутите 20 раз внутри пробирки, чтобы хорошо перемешать.

2. Метод испытания

- 5) Поместите тест-набор на ровную поверхность.
- 6) Закройте пробирку с буферным раствором с помощью крышки.
- 7) Нанесите 3 капли на пробоотборное отверстие тестового устройства.
- 8) Прочтите результат теста через 15 мин.
- 9) По истечении 20 мин, результаты теста могут оказаться ложными.
- 10) Даже если линия проявилась слабо, ее наличие следует определять с учетом клинических симптомов пациента.

Клиническая чувствительность – 90.9% – (из 100 инфицированных определит как инфицированных 90.9)

Клиническая специфичность – 96.9% – (из 100 здоровых определит как здоровых 96.9)

Не требует особых условий хранения и транспортировки.

