

# НАДУВНАЯ ВАННА

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



*Настоящее руководство по эксплуатации на ванну для мытья лежащих пациентов (далее ванна или изделие), предназначено для ознакомления с работой, и содержит сведения по использованию, регламенту работы и технические характеристики.*

## СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	Стр 3
2	Меры безопасности	Стр 3
3	Порядок использования	Стр 4
4	Технические данные	Стр 6
5	Техобслуживание и уход	Стр 6
6	Ремонт	Стр 7
7	Электрический насос	Стр 7
8	Гарантийные условия	Стр 9

- Водонепроницаемый материал ПВХ
- Легкая очистка
- Экономия времени



## ВВЕДЕНИЕ

Надувные ванны – это удобное приспособление, упрощающее проведение гигиенических процедур у инвалидов и лежачих больных. Их главным преимуществом является отсутствие необходимости в перемещении пациента. Мытье тела осуществляется на кровати или рядом с постелью.

Использование надувной ванны необходимо для мытья тела и головы человека, который по состоянию здоровья не может передвигаться самостоятельно. Регулярные гигиенические процедуры снижают вероятность образования пролежней, опрелостей, раздражения. Надувное приспособление упрощает работу медперсонала и родственников, которые вынуждены на руках относить больного в обычную ванну или мыть тело губками, не достигая должного эффекта.

### Ванны надувные имеют много преимуществ:

- гигиенические процедуры проводятся в любом удобном месте, даже на постели;
- постель остается сухой, в отличие от мытья тела губками;
- подходят для любой, в том числе, для ортопедической кровати;
- легко моются;
- не занимают много места при хранении;
- универсальны – подходят для людей всех типов телосложений.

Изготавливается ванна из плотного полимерного материала, не изнашивающегося в течение длительного времени.

Надувные ванны рекомендуются для использования в стационарах, пансионатах, реабилитационных центрах, домах престарелых и других организациях, где осуществляется уход за лежачими больными. Применять их можно и в домашних условиях, благодаря небольшому весу и компактному размеру пользоваться ими могут социальные работники, ухаживающими за больными и пожилыми людьми.



## **МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ**

**! Внимательно прочтите все инструкции перед использованием и сохраните их для дальнейшего использования.**

- Если продукт будет использоваться в холодных помещениях, перед использованием замочите его в теплой воде на 2–3 минуты.
- Перед первым использованием промойте изделие теплой водой. Не используйте сильнодействующие или вызывающие коррозию моющие средства.
- Всегда проверяйте перед использованием, чтобы изделие было установлено устойчиво.
- Никогда не используйте изделие на приподнятой поверхности, не предназначенной для изделия.
- Не используйте изделие на открытом воздухе. Не используйте и не размещайте изделие на лестнице или рядом с ней, а также на неровной поверхности, где оно может опрокинуться и нанести травму. Поместите изделие на ровную устойчивую поверхность.
- Не используйте и не размещайте изделие вблизи открытого огня или других источников тепла — опрокидывание изделия может привести к возгоранию и/или ожогам.
- Не начинайте заливать только горячую воду – температура воды не должна превышать 50° С. Убедитесь, что вода имеет подходящую температуру. Наполнить до необходимого уровня, но не более чем на 2/3 высоты изделия.
- Изделие будет иметь слабый пластиковый запах при первом использовании. Это совершенно нормально, и со временем запах исчезнет. Изделие изготовлено из нетоксичных материалов и полностью безопасно в использовании.
- Подходящая температура воды составляет от 38 до 42 ° С. Время купания должно составлять от 15 до 20 минут.
- Слейте воду после использования изделия. Не оставляйте воду в ванне слишком долго, так как это может привести к его деформации.
- Не позволяйте детям играть рядом с ванной, если в ней есть вода.
- Не используйте ванну, если какие-либо детали повреждены или отсутствуют.
- Используйте только детали и принадлежности, рекомендованные производителем.
- Никогда не используйте изделие для каких-либо иных целей, кроме принятия ванны
- Бак для купания разделен на ОДИН слой накачивания. Не надуйте слишком сильно, чтобы избежать разрыва под действием силы тяжести!
- Во время использования все надувные изделия должны быть заполнены воздухом только на три четверти объема. Если воздух слишком сложен в использовании, это будет неудобно и повлияет на срок службы.
- Прямой контакт с острыми и твердыми предметами строго запрещен во избежание повреждений от проколов и утечки воздуха

## **ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

**! Если приспособление хранилось в прохладном помещении, то сначала ванну нужно поддержать при комнатной температуре.**



1. Разверните ванну, переверните пользователя на бок, расстелите ванну в спущенном состоянии аналогично простыне.



2. Присоедините шланги для слива воды



3. Надуйте ванну входящим в комплект компрессором. Сначала надувается сама ванна, затем – подушка. **! Главное, не перекачать, чтобы твердость материала была умеренной.**



4. Закройте заглушку



5. Подготовьте душевую систему



6. Произведите гигиенические процедуры (если в комнате прохладно, можно накрыть пользователя полотенцем)



7. Слейте накопившуюся воду и оберните тело пользователя банным полотенцем



8. Удалите остатки воды, сдуйте ванну с помощью компрессора, переверните пользователя на бок и вытащите ванну.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Происхождение товара	Guangdong, China
Тип	Надувная ванна
Внешние габариты в надутом состоянии, см	190 x 90 x 23
Внутренние габариты в надутом состоянии, см	170 x 70 x 23
Материал	0,35 мм ПВХ
Цвет	Белый
Сливное отверстие	Есть
Вместимость	1 человек
Максимальный вес пользователя	150 кг
Возрастная группа	От 10 лет
Комплектация	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ванна</li><li>• Надувной подголовник</li><li>• Насос электрический</li><li>• Душевая система</li><li>• Ремкомплект</li></ul>
Длинна сливного шланга	
Длинна душевого шланга	
Объем мешка для воды	8 л
Размеры упаковки, см	40X30X10
Вес упаковки	3,5 кг
Гарантия	6 месяцев

#### ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

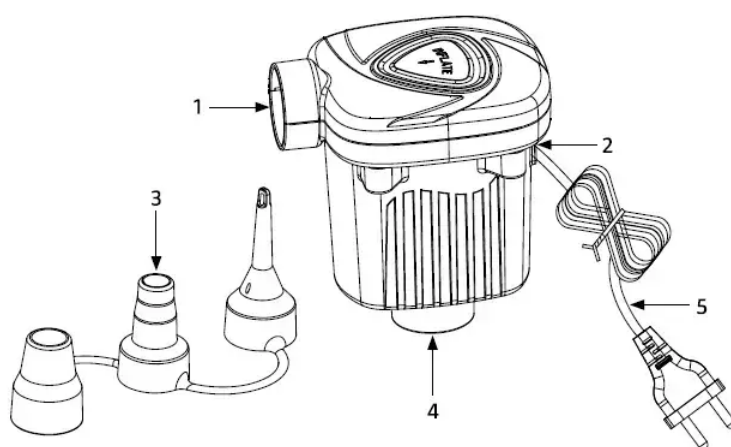
- Проверяйте надлежащее качество ванны перед каждым использованием. Если изделие используется не регулярно, то осматривайте его минимум раз в год. В случае поломки или неисправности, повреждений или разрывов одного или нескольких деталей, не используйте изделие.
- Внешнюю поверхность ванны обрабатывайте дезинфицирующими средствами, зарегистрированными и разрешенными в РК для дезинфекции поверхностей по режимам, регламентированным действующими документами по применению дезинфицирующих средств, утвержденными в установленном порядке.
- Всегда держите ванну в чистоте для использования в течение длительного срока.
- Очищайте с помощью воды и моющих средств. Не используйте растворители и абразивные средства. Протирайте ванну сухой тряпкой после каждого использования.
- Высушивайте изделие перед уборкой на хранение

**Маленькие отверстия**

- Выпустите из надувной ванны всю воду и воздух.
- Высушите поврежденный участок.
- Вырежьте заплатку такого размера, чтобы закрыть отверстие. Убедитесь, что заплатка имеет запас не менее 1.5 см вокруг отверстия.
- Нанесите клей как на поврежденный участок, так и на заплатку.
- Прижмите пластырь к отверстию и крепко удерживайте его на месте в течение 30 секунд.
- Подождите не менее 4 часов, пока клей высохнет, прежде чем снова использовать ванну.

**Порез**

- Вырежьте прозрачную заплатку подходящего размера и нанесите клей как на поврежденный участок, так и на заплатку.
- Прижмите пластырь к порезу и удерживайте его на месте в течение 30 секунд.
- Подождите не менее 4 часов, пока клей высохнет, прежде чем снова использовать изделие

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС****ЧАСТИ НАСОСА**

1. Порт для инфляции
2. Выключатель
3. Форсунка
4. Порт для дефляции
5. Шнур питания

- Одобрено в соответствии с соответствующими директивами.
- Утилизируйте выброшенный продукт в соответствии с местными нормативными актами.
- Класс безопасности 11

- Насос работает с большим объемом и низким давлением. Предназначен для надувания и спуска воздуха с резиновых лодок, надувных матрасов и т.п. Насос не предназначен для постоянного использования. Не используйте более 10 минут за один раз. Это может привести к перегреву и повреждению изделия.
- Этот продукт может использоваться детьми от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами, не имеющими опыта или знаний, если они находятся под присмотром или

получили инструкции относительно безопасного использования продукта и понимают риски, связанных с его использованием. Не позволяйте детям играть с изделием. Не позволяйте детям чистить или обслуживать изделие без присмотра.

- Изделие предназначено только для бытового использования в помещении. Не используйте изделие на открытом воздухе.
- Шнур питания не подлежит замене. Если шнур питания или вилка повреждены, продукт должен быть утилизирован или заменен авторизованным сервисным центром или другим квалифицированным персоналом для обеспечения безопасного использования.
- Вытащите вилку и дайте изделию остыть перед очисткой.
- Протрите продукт чистой влажной тканью, а затем вытрите сухой тканью. Никогда не погружайте изделие в воду или любую другую жидкость.
- Никогда не блокируйте порты инфляции и дефляции.
- Используйте подходящий адаптер для быстрого надувания изделия и, таким образом, сведите к минимуму время работы двигателя.
- Всегда следуйте инструкциям при надувании изделия. Никогда не превышайте рекомендуемое давление нагнетания, так как это может привести к взрыву изделия, что может привести к травме.
- Никогда не оставляйте насос без присмотра во время использования.
- Не подвергайте насос воздействию дождя или влаги.
- Следите за тем, чтобы песок, мелкие камни и т.п. не попали в порты инфляции/дефляции во время использования.
- Никогда не направляйте порты инфляции или дефляции на лицо и глаза во время использования и не смотрите в них.
- Никогда не пытайтесь помещать пальцы или другие части тела поверх или внутрь портов для инфляции или дефляции.

#### **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

**Не подвергайте шнур питания или вилку воздействию воды или других жидкостей — опасность поражения электрическим током.**

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТОО «Жаркын тау»

Адрес: РК, г. Алматы, ул. Сатпаева 30/8

www.newdays.kz

### Контактная информация:

Тел: +7 702 910 00 47, +7 727 327 7694

tay.18@mail.ru, info@newdays.kz

Дата покупки: \_\_\_\_\_

Номер заказа/чека: \_\_\_\_\_

### Информация о покупке:

- Наименование товара: **Надувная ванна в комплекте**

### Гарантийные условия:

1. Гарантийный срок составляет 6 месяцев с момента покупки.
2. Гарантийное обслуживание предоставляется при условии соблюдения правил эксплуатации:
  - Использование в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
  - Отсутствие механических повреждений, следов падений или ударов.
  - Обеспечение надлежащего ухода и чистки изделия.
  - Неиспользование с нарушенной целостностью и/или поврежденными элементами.

### Процедура в случае гарантийного случая:

1. В случае обнаружения неисправности, покупатель обязан незамедлительно связаться с продавцом и предоставить всю необходимую информацию о проблеме.
2. Покупатель обязан предоставить гарантийный талон, а также чек/документ, подтверждающий покупку товара.
3. Продавец обязуется провести диагностику товара и в случае подтверждения гарантийного случая, произвести бесплатный ремонт или замену товара.

### Внимание!

- Гарантийное обслуживание не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией или нарушением правил использования.
- Гарантийный талон является документом, подтверждающим гарантийные обязательства продавца и должен быть предъявлен при обращении по гарантии.

-----  
Подпись и печать продавца:

Дата заполнения: \_\_\_\_\_