



ОЗТЕХ

---

## Руководство по эксплуатации



**BEAUTYSHELL**

---



# Содержание

Введение.....	1
Комплектация.....	2
Техника безопасности .....	3
Регулировка сидения.....	4
Выбор процедуры .....	5
Озонотерапия .....	6
SPA-процедура .....	7
Фитотерапия .....	8
Таблица проведенных процедур .....	9

# Введение

Капсула **BEAUTYSHELL** предназначена для проведения процедуры системной озонотерапии в условиях санаторно-курортного лечения, медицинских центров государственного и частного сектора, различных клиник общеоздоровительного и косметологического направления.

Преимуществами данного вида терапии является задействование небольших помещений для размещения аппарата, отсутствие необходимости вовлечения медицинского персонала и широкие показания для терапии озоном без инъекций, с очень ограниченным списком противопоказаний.

Капсула может быть использована у широкого круга пациентов как с профилактической целью (например, при вспышках вирусных заболеваний), так и в комплексной терапии у коморбидных пациентов с целью ускорения получения основного эффекта и снижения нежелательных явлений от основной терапии.

В косметологических центрах капсула чаще всего показана как процедура, помогающая ускорить процессы регенерации кожи при поверхностном микроразрыве, снижении отечности, повышения общего тонуса организма и реабилитации после косметических процедур. Эффект заметен после первой процедуры.

Капсула оснащена дополнительными безозоновыми функциями: SPA и ФИТО.

В режиме SPA капсула помогает разогреть кожные покровы и мышцы перед проведением массажных процедур и масок для тела.

В режиме ФИТО теплый пар обогащается травяными сборами с целью получения расслабляющего и успокаивающего эффекта на кожу и организм в целом.

# Комплектация

1. Подголовник
2. Корпус
3. Двери с ленточными ограничителями
4. Регулируемое сидение
5. Снимаемый защитный корпус системы подачи пара
6. Бак с заливной горловиной и крышкой (Объём - 10 литров)
7. Резиновый коврик
8. Мягкий коврик
9. Пульт управления
10. Блок подключения с кнопкой
11. Шнур питания
12. Элементы крепления картриджей
13. Картриджи для наполнителя

# Обслуживание

1. Использовать дистиллированную воду.
2. Не допускать засорения и перекрытия системы вентиляции.
3. Протирать монитор спиртосодержащим раствором.
4. После каждой процедуры протирать внутреннюю часть капсулы сухой тряпкой с нейтральными моющими средствами.

# Техника безопасности

1. Не трогать расположенный внутри капсулы датчик температуры.
2. Проводить процедуру в хорошо проветриваемом помещении.
3. Во время процедуры не ставить ноги напротив выходов системы подачи пара.
4. Во время процедуры не заслонять плечами форсунки выхода озона.
5. Рекомендуется использовать одноразовое нижнее белье.

## Рекомендация проведения сеанса:

1. Подключите один конец кабеля питания к капсуле, второй конец - к розетке.
2. Включите тумблер.
3. Разместите резиновый коврик на полу внутри капсулы (под ноги)
4. Залейте дистиллированную воду в резервуар через специальную горловину.
5. Перед началом процедуры необходимо прогреть воду в системе, для этого нажмите кнопку “ПРОГРЕВ” за 10 минут до начала сеанса.
6. Отрегулируйте высоту сиденья так, чтобы голова человека находилась выше уровня дверей капсулы.
7. Необходимо разместить человека так, чтобы его тело не закрывало форсунки подачи пара и озона.
8. Выберите параметр процедуры и нажмите кнопку “СТАРТ”.
9. После окончания сеанса капсула автоматически перейдет в режим ожидания.

## Противопоказания


1. Открытые раны
2. Алкогольно-наркотическое состояние
3. Беременность

# Регулировка сидения

1. Выберите подходящий уровень (см. таблицу ниже)
2. Установите в нужные пазы.

Рост человека	Уровень сидения (пазы снизу вверх)
Выше 205 см	1
195-205 см	2
185-195 см	3
175-185 см	4
Ниже 175 см	5

Для того, чтобы попасть в меню настроек даты и время необходимо на экране выбора процедуры **5 раз** нажать на букву “L” в названии “**BEAUTYSHELL**”.

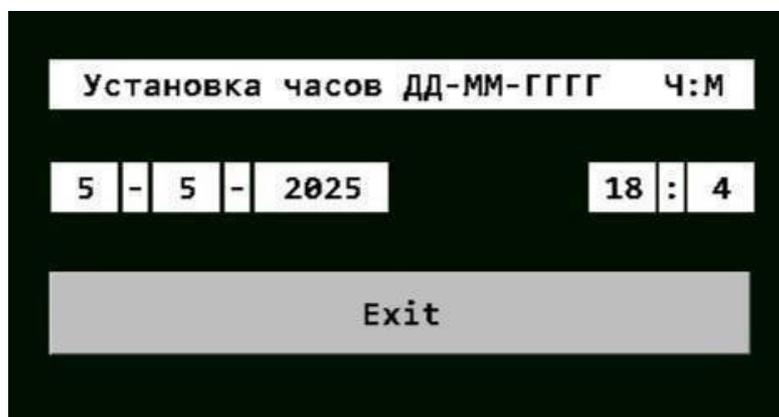

## Экран выбора процедуры

**BEAUTYSHELL**

Функционал:

1. Озонотерапия
2. СПА-процедура
3. Фитотерапия
4. ПРОГРЕВ (система автоматически запускает прогрев воды на 10 мин.)


ФИТО

СПА

ОЗОН

ПРОГРЕВ

# BEAUTYSHELL

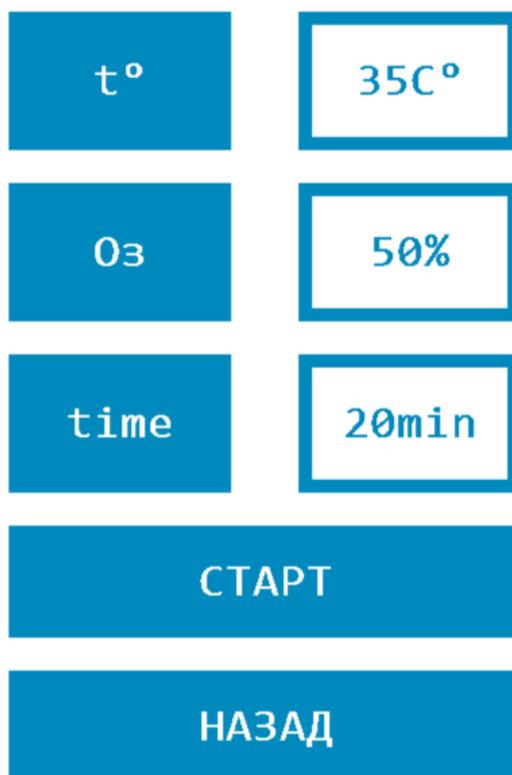

## Процедура “ОЗОН”

1. С помощью кнопки **t°** выберете температуру проведения процедуры от 35 до 41.
2. С помощью кнопки **Oз** выберете концентрацию озона от 10% до 100% (рекомендуется 100%).
3. С помощью кнопки **time** выберете время проведения процедуры от 20 до 60 мин.
4. Для запуска процедуры нажмите кнопку **СТАРТ**
5. Для ручной остановки процедуры нажмите кнопку **НАЗАД**